

GC EQUIA Forte

Sistema de Restauración de Vidrio Híbrido para obturación en bloque.

★ Beneficios

- Aplicación en bloque
- carece de stress de contracción
- Alta Liberación de Flúor
- No son necesarios acabados ni pulidos complejos
- Sellado Marginal Superior
- No se necesita de Primer o Adhesivos
- Unión incluso en Presencia de humedad
- Alta resistencia compresiva
- Alta resistencia a los ácidos

🦷 Usos Clínicos

RESTAURATIVO

- Restauraciones de clase I.
- Restauraciones de clase II con estrés
- Restauraciones intermedias.
- Restauraciones de clase V y de superficies radicales.
- Reconstrucción de muñones.
- Remplazo de la amalgama
- Solución de Restauraciones de HMI
- Gerodontología

✓ Propiedades Físicas (caps. rinde 1.8ml)

Proporción Polvo / Líquido capsula: 0.40 / 0.13

Tiempo de mezcla (s)	10"
Tiempo inicial de extrusión tras el mezclado	10 segundos máximo
Tiempo de trabajo (min., s)*	1' 15"
Tiempo neto de fraguado (min., s)*	2' 00"
Tiempo para comenzar el acabado final (37° C, tras el comienzo de la mezcla) (min.,s)	2' 30"
VLC tiempo de polimerizado de la capa EQUIA Forte Coat	20"

🔧 Manipulación

ACTIVACION DE LA CÁPSULA Y MEZCLADO

- Antes de activar, agite la cápsula o golpéela sobre una superficie dura para desapelmazar el polvo.
- Para activar la cápsula, empuje el émbolo hasta que alcance el nivel del cuerpo principal.

Nota: La cápsula ha de activarse justo antes de la mezcla y debe ser utilizada inmediatamente.

- Seguidamente, colóquela en el mezclador (o amalgamador) y mezcle durante 10 segundos (+/-4.000 RPM).

C) Coloque la capsula en el GC CAPSUL APLIER de 3 clicks y dispense en la cavidad.

ACABADO: Bajo spray de agua usando fresas de diamante de grano fino o extrafino



Antonio.Arroyo@gc.dental
andoni.cedillo@gc.dental