

GC Gold Label Hybrid

Ionómero de Vidrio Híbrido indicado como material restaurador



★ Beneficios

- Fuerte Adhesión
- Fraguado Rápido
- Alta Liberación de Flúor
- Sellado Marginal Superior
- No se necesita de Primer o Adhesivos
- Unión incluso en Presencia de humedad
- Alta resistencia mecánica y durabilidad
- Alta Estética
- Más translucidez y mimetismo con el tejido dental
- Alta capacidad de resistencia a los ácidos



Usos Clínicos

RESTAURATIVO

- Restauraciones Clase I y Clase II en dientes primarios
- Clase I y Clase II que no sean sometidos a carga
- Restauración provisional
- material de base para situaciones de gran estrés en cavidades de Clase I y Clase II utilizando la técnica sándwich.
- Clase V y restauraciones de superficie radicular
- Reconstrucción de núcleos



Propiedades Físicas (rinde 40 a 45 dosis)

Proporción Polvo / Líquido:

1 cucharada con Polvo y 1 Gotas de Líquido

Tiempo de mezcla (segundos)	25-30 s
Tiempo de trabajo (23°C/73°F) (minutos, segundos)	1 min 45 s
Tiempo de fraguado neto (37°C/99°F) (minutos, segundos)	2 min 40 s
Tiempo de acabado/pulido (37°C/99°F), desde el inicio de la mezcla (minutos)	6 min



Manipulación

DISPENSADO DE POLVO Y LIQUIDO

- Para una administración más precisa de polvo, golpee ligeramente el frasco contra su mano. Pero no lo agite ni lo invierta.
- Mantenga vertical el frasco del líquido y presione ligeramente.
- Cierre ambos frascos inmediatamente después de su utilización.

Nota: Opcionalmente, utilice CAVITY CONDITIONER

MEZCLA

Dispensar el polvo y el líquido hacia el bloc de papel, Utilizando una espátula plástica divida el polvo en dos partes iguales, Mezcle la primera mitad del polvo con el líquido durante 10 segundos, Incorpore la porción de polvo remanente y mezcle enérgicamente por 15 a 20 segundos



Antonio.Arroyo@gc.dental
andoni.cedillo@gc.dental