

GC EverX Flow

Composite Fluido Reforzado con Fibras cortas para la sustitución de la Dentina

★ Beneficios

- ◆ Ideal para reforzar restauraciones de gran tamaño gracias al efecto de refuerzo de las fibras.
- ◆ Excelente resistencia a las fracturas que reduce el riesgo de roturas.
- ◆ Tixotropía perfecta para una colocación y una adaptación sencillas.
- ◆ Sin descolgamiento, ni siquiera en los molares superiores.
- ◆ Procedimiento rápido cuando se utiliza el color Bulk (con una capa de hasta 5,5 mm de espesor).

🦷 Usos Clínicos

SUSTITUTO DE DENTINA

- ◆ Cavidades posteriores de gran tamaño,
- ◆ cavidades profundas
- ◆ Dientes tratados endodónticamente,
- ◆ Cavidades a las que les faltan cúspides.
- ◆ Después de retirar una amalgama.
- ◆ Cavidades en las que también se recomiendan las incrustaciones provisionales y definitivas.
- ◆ Reconstrucción de muñones.

🔧 Manipulación

Selección de Color: Limpie el diente con piedra pómez y agua. Seleccione el color de everX Flow: Bulk shade o Dentin shade.

Tratamiento adhesivo: Para la adhesión de everX FLOW a esmalte y/o dentina, utilizar un sistema adhesivo fotopolimerizable como SOLARE UNIVERSAL BOND/ G PREMIO BOND/ G-2 BOND. Seguir las instrucciones del fabricante.

Antes de extruir el material, por favor revise lo siguiente:

1. La punta dispensadora está correctamente conectada a la jeringa

✓ Propiedades Físicas

Glass fibres	E-glass fibres
Average length of fibres	140um
Diameter of fibres	6um
Particulate fillers	Barium glass
Main monomers in resin matrix	Bis-MEPP, TEGDMA, UDMA
Filler rate (w/w)	70%
% of fibres (w/w)	25%
% of particle fillers (w/w)	Barium glass: 42-52% Silicon dioxide: Trace
% of resin matrix (w/v)	Bis-MEPP: 15-25% TEGDMA: 1-10% UDMA: 1-10%

2. Coloque la punta dispensadora tan cerca como sea posible de la cavidad y presione suavemente el émbolo
3. Cuando coloque el everX Flow en la cavidad, asegúrese de tener suficiente espacio para cubrir con composite todas las superficies de la restauración.

Nota: EverX Flow siempre debe cubrirse con un material de restauración composite universal fotopolimerizable, para una suficiente resistencia a la abrasión.

