

GC G-Aenial Universal Injectable

Composite Restaurador Fluido Universal de alta Resistencia



★ Beneficios

- ◆ Resistencia a la abrasión excepcional gracias a la combinación de rellenos de bario ultrafinos y la tecnología de recubrimiento de tipo silano de cobertura total (FSC) de GC.
- ◆ Elevada radiopacidad del 252 %
- ◆ Viscosidad tixotrópica se adapta a cualquier situación clínica: no se descuelga durante la aplicación.
- ◆ Capacidad de pulido y una retención del brillo inigualables
- ◆ Adecuado para cualquier tipo de cavidad sin limitación de tamaño

🦷 Usos Clínicos

RESTAURATIVOS

- ◆ Material de restauración para
- ◆ cavidades de clase I, II, III, IV y V.
- ◆ Sellador de fisuras.
- ◆ Obturación de zonas hipersensibles.
- ◆ Reparación de restauraciones estéticas
- ◆ (in)directas, coronas y puentes
- ◆ provisionales, márgenes defectuosos
- ◆ cuando los márgenes tienen esmalte.
- ◆ Bloqueo de socavaduras
- ◆ Liner o base

✓ Propiedades Físicas (69% relleno)

G-ænial Universal		Content (% in weight)
Matrix	Methacrylate mono-mer	31%
Fillers	17µm	69%
	Barium glass	
Pigments		Trace
Photo initiator		Trace

🔧 Manipulación

Selección de Color La selección de color deberá de hacerse antes del aislamiento. tono apropiado A1, A2, A3

Tratamiento adhesivo: Para adherir al esmalte o dentina utilice sistema adhesivo fotopolimerizable (solare universal bond) leer instrucciones de producto.

Coloque la punta dispensadora lo más cerca posible de la cavidad preparada, y lentamente empuje el émbolo de la jeringa.

Tiempo de irradiación e intensidad de Profundidad de Fraguado (ISO 4049)

	10 sec. (LED Alta Potencia) (> 1200 mW/cm ²) 20 sec. (Halogen/LED) (> 700 mW/cm ²)
A1, A2, A3, B1, B2, JE, AE	2.5 mm
XBW, BW, A3.5, A4, AO1, AO2, CV, CVD	2.0 mm
AO3	1.5 mm

