



GC Solare Universal Bond

Sistema Adhesivo de Autograbado
Fotopolimerizable

★ Beneficios

- ◆ Excelentes resultados de fuerza adhesiva en dentina y esmalte.
- ◆ Posibilidad de grabar el esmalte sin poner en riesgo la fuerza de adhesión a la dentina
- ◆ Elevados valores de adhesión y muy buena integridad marginal gracias a la combinación de adhesión química y unión micromecánica.
- ◆ La fórmula sin HEMA proporciona resistencia a la hidrólisis del colágeno.
- ◆ Sin sensibilidad postoperatoria, independientemente de la técnica o el composite.

🦷 Usos Clínicos

RESTAURATIVOS

- ◆ Adhesión a la estructura dental de composites fotopolimerizables y compómeros.
- ◆ Adhesión a la estructura dental de composites de cementación y materiales de muñones de polimerización dual, siempre que estos materiales sean fotopolimerizables.

✓ Propiedades Físicas (rinde 40 a 45 dosis)

Fotopolimerización usando una unidad de fotopolimerización de luz visible

Tiempo de Irradiación	Distancia de la punta de la guía de luz <10 mm	Distancia de la punta de la guía de luz >10 mm
Halógena / LED (700-1200 mW/cm ²)	10 segundos	20 segundos
Alta potencia LED (más de 1200 mW/cm ²)	5 segundos	10 segundos

🔧 Manipulación

OPCIONES DE TÉCNICA:

Técnica de autograbado Aplicar SOLARE UNIVERSAL BOND al esmalte y dentina, cortada (preparado con fresa), sin un paso separado de grabado. Nota: El esmalte no cortado deberá siempre ser tratado con gel de ácido fosfórico al 35-40% durante 10 segundos, enjuagarse con agua durante 5 segundos y secarse con cuidado.

Grabado selectivo del esmalte Antes de aplicar SOLARE UNIVERSAL BOND al esmalte y la dentina,

grabar el esmalte con gel de ácido fosfórico al 35-40% durante 10-15 segundos, enjuague durante 5 segundos y secar con cuidado.

Grabado Total del esmalte Antes de aplicar SOLARE UNIVERSAL BOND al esmalte y la dentina, grabar el esmalte con gel de ácido fosfórico al 35-40% durante 10-15 segundos, enjuague durante 5 segundos y secar con cuidado.